

## Io utilizzo il comunicatore MegaBee


Per parlare con l'utente disabile basta prendere il MegaBee e tenerlo in una posizione che consenta sia all'operatore che all'utente, di osservarsi l'uno con l'altro attraverso lo spazio libero presente al centro del dispositivo

Premendo il comando nero presente nel mezzo del dispositivo, MegaBee si aziona.



Per comunicare, seguire gli occhi dell'utente disabile e solo quando quest'ultimo, attraverso l'occholino od un altro segnale di intesa, indicherà la lettera prescelta, l'operatore dovrà premere uno dei comandi sulla destra del dispositivo, del colore corrispondente al blocco prescelto.

Una volta selezionato il blocco cui appartiene la lettera di riferimento, basta seguire di nuovo gli occhi dell'utente che indicando ancora una volta il blocco dello stesso colore della lettera quelli presenti sul dispositivo, segnalerà esattamente la lettera che andrà selezionata e che dopo un attimo apparirà sullo schermo.

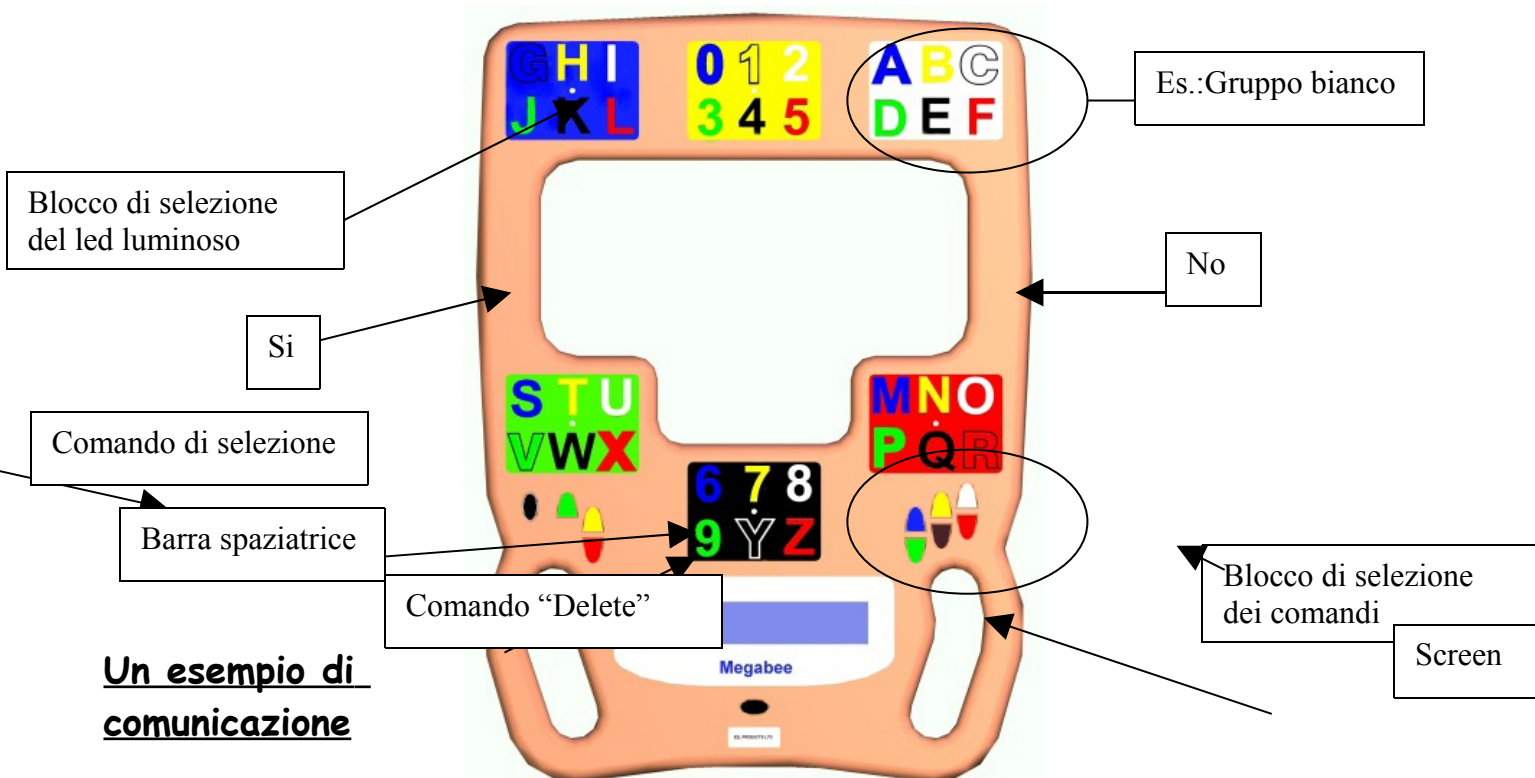

**Un esempio di comunicazione**

Se si dovesse scrivere  
percorso sarebbe il seguente

la parola Ciao, il

Utente disabile	Operatore
Osserva la lettera C e fa l'occholino	(la lettera C corrisponde alle lettera bianca all'interno del blocco bianco) L'operatore selezionerà pertanto il blocco bianco attraverso il comando di destra che si illuminerà.
La lettera C è di colore bianco per cui l'utente osserverà il blocco bianco e farà l'occholino	L'operatore schiaccerà il comando bianco
La lettera C apparirà sul display	
Osserva la lettera I e fa l'occholino	(la lettera I corrisponde alle lettera bianca all'interno del blocco blu) L'operatore selezionerà pertanto il blocco blu che si illuminerà.
La lettera I è di colore bianco per cui l'utente osserverà il blocco bianco e farà l'occholino	L'operatore schiaccerà il comando bianco
La lettera I apparirà sul display	

L'operazione proseguirà per le successive lettere fino alla composizione per intero della parola **Ciao**.